



Шкафы медицинские серии MD
Инструкция по сборке.

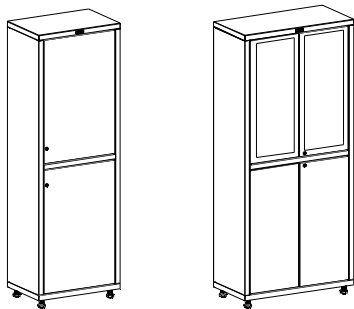



Шкафы одностворчатые(верхнее и нижнее отделение со стальными дверцами и полками) и двухстворчатые (верхнее отделение с дверцами со стеклом в стальной рамке и стальными полками,нижнее отделение со стальными дверцами и полками)

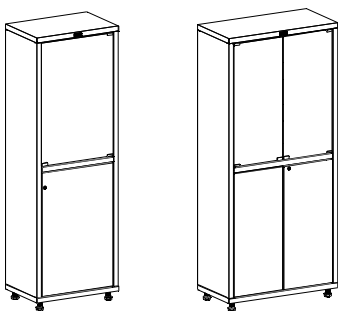

Шкафы одно- и двухстворчатые (верхнее отделение со стеклянными дверцами и полками; нижнее отделение со стальными дверцами и полками)


Перед сборкой

1. Сборку проводите на мягкой неабразивной поверхности (ковролин, линолеум, картон и т.д.) во избежание появления царапин на поверхностях деталей при сборочных операциях
2. Будьте осторожны при использовании шуруповерта, вращающийся патрон может повредить лакокрасочное покрытие шкафа.

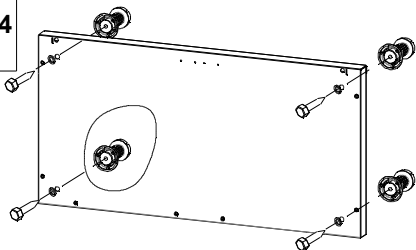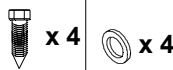


1

Установите регулируемые опоры на основание, используя саморезы идущие в комплекте вместе с опорами. С саморезами использовать шайбы M10.

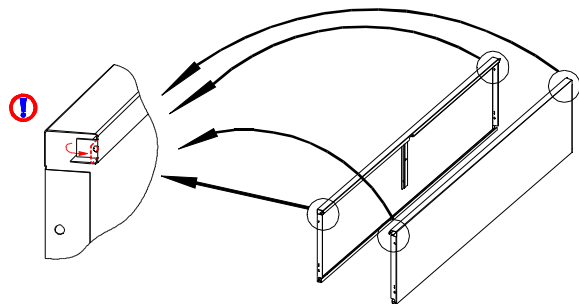

2

На боковых стенках на торцевых гребнях выпрямить язычки (по 2 язычка на стенку), которые изначально загнуты из-за особенностей технологии производства

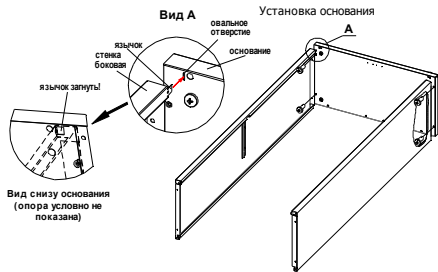


1. Соединить правую боковую стенку с основанием, так чтобы язычок попал в овальное отверстие на основании (см. вид А).
2. Вкрутить винты согласно рисунку
3. Загнуть язычок боковой стенки
4. Левую стенку соединить с основанием аналогично правой

3


Установка задней (-их) стенки (-ок)



Соединение боковой и задней стенки

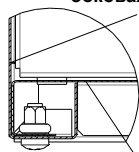

задняя стенка


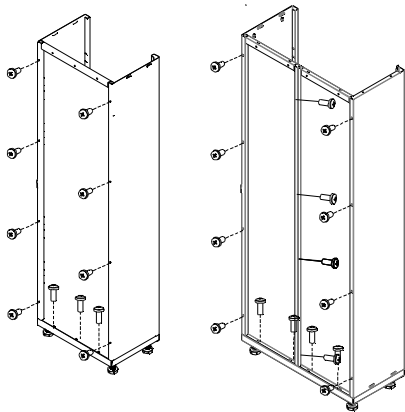


1. Поставить шкаф вертикально
 2. Установить заднюю (-ие) стенку(-и)
 3. Вкрутить винты согласно рисунку
- Примечание: Будьте внимательны при установке задней(-их) стенки(-ок). Следите чтобы приварное ребро открытым зевом смотрело вверх (см. вид В)

4




Установка крыши

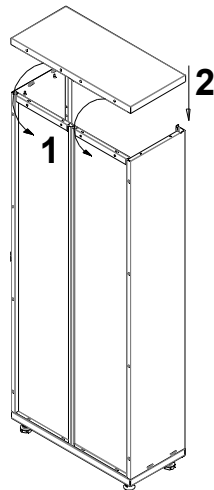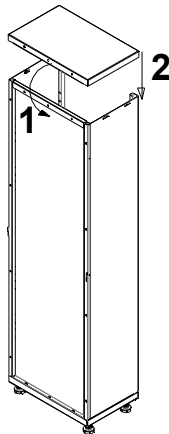

1. Заведите гребень на задней части крыши за гребень на задней стенке
2. Равномерно опустите переднюю часть крыши до характерного щелчка.
3. Зафиксируйте крышку при помощи винтов.

5

Установка разделителя

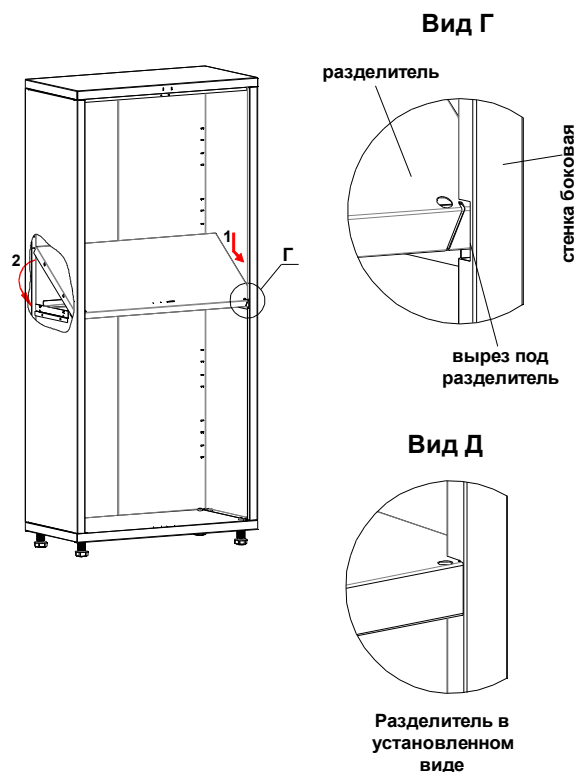


1. Заведите внутрь шкафа разделитель, так чтобы его плоскость была под углом, как показано на рисунке.
2. Опускайте разделитель так, чтобы его передняя кромка попала в вырезы на боковых стенках (см. вид Г)
3. Опустите заднюю часть разделителя, так чтобы его плоскость стала параллельна основанию, при этом его боковые и задний гибы должны попасть в соответствующие зевы ребер на боковых и задней(-их) стенки(-ок). (См. вид Д)


6

Установка магнитных защелок


двустворчатый шкаф

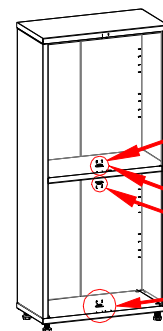


Вид Е (для шкафов со стеклянными дверями)

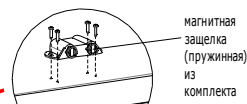

Вид Ж

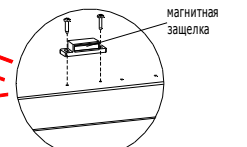


одностворчатый шкаф

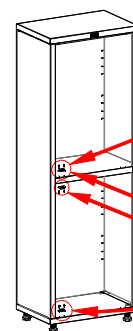

Вид З (для шкафов со стеклянными дверями)



Вид И

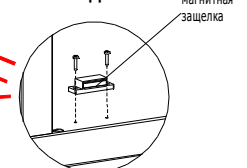

1. Установите магнитные защелки из комплекта (см. Виде Е-И)
2. Для шкафов со стеклянными дверцами, в верхнее отделение устанавливается пружинная защелка с лифтовым механизмом (см. Вид Е и З)


Замечание: Не затягивайте сразу шурупы магнитных защелок. Сначала отрегулируйте выступание/западание дверок и уже после этого затяните шурупы

7

x 16

Установка полок

Установка скоб под полки

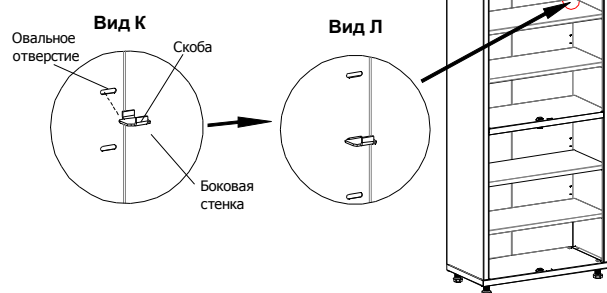

1. Установите скобы под полки (см. Вид К и Л)
2. Установите полки в шкаф, по две в верхнее и нижнее отделение.

Примечание: Стеклянные полки ставятся в верхнее отделение

8


x 2 x 2

для одностворчатого

x 4 x 4

для двустворчатого

Установка стальных дверок

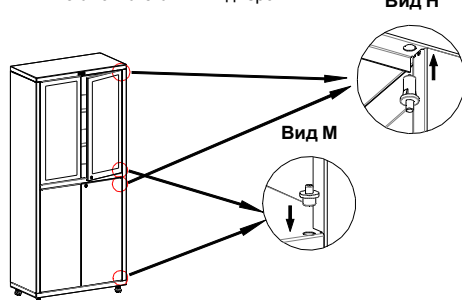

1. Предварительно очистите от напылов отверстия под оси в дверках.
2. Установите цельнопластиковые оси вниз (см. вид М)
3. В верхние отверстия установите пружинные оси. (см. вид Н)
4. Установите дверку так, чтобы нижняя ось вошла в отверстие дверки, далее придавите шток пружинной оси и заведите дверку под ось, шток должен отщелкнуться в отверстие дверки.

Примечание: Вы можете подложить под нижнюю ось регулировочную шайбу (идет в комплекте) для регулировки зазора между дверью и корпусом шкафа



9

Установка стеклянных дверок


Вид П



Вид О Петля для стеклянной дверцы

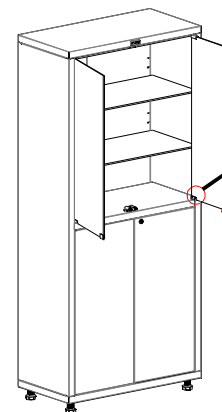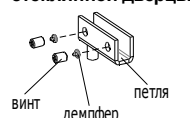

Вид Р

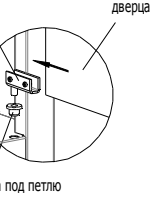

Вид Р



1. Возьмите из комплекта петли (петли идущие в комплекте с пружинной магнитной защелкой не используйте) для стеклянных дверей и убедитесь, что на торцах винтов установлены демпферы (См. Вид О)
2. Установите втулки в отверстия в разделителе и крыши. Во втулки установите петли, предварительно выкрутив винты так, чтобы в паз могло войти стекло. (См. Вид П)
3. В пазы петель установите стекло, выровняйте его и затяните винты на петлях
4. Установите накладку под магнитную защелку (из комплекта с пружинной магнитной защелкой) на стекло. (См. Вид Р)

10

Пояснения к инструкции

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом верхнем углу ее изображения.
3. Пункты инструкции обозначенные символом являются важными для сборки и обязательно к исполнению.


Рекомендации по эксплуатации медицинских шкафов

1. Установку шкафа следует производить на ровной горизонтальной поверхности
2. Для компенсации неровностей пола, произвести регулировку ножек (после пунктов 8 или 9).
3. Навеску дверей рекомендуется производить непосредственно по месту эксплуатации шкафа
4. Загрузку шкафа (документами, медикаментами и т.п.) следует начинать с нижней части шкафа.
5. Рекомендуется распределять груз по поверхности полок шкафов для их равномерной загрузки

Примечания


1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

Установите второй (верхний) разделитель по аналогии с первым (нижним) разделителем.

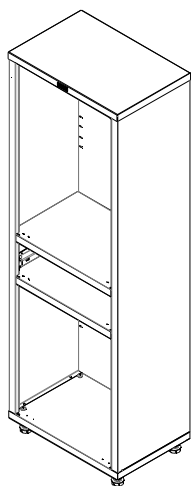

10

Установите направляющие на правый и левый кронштейны.

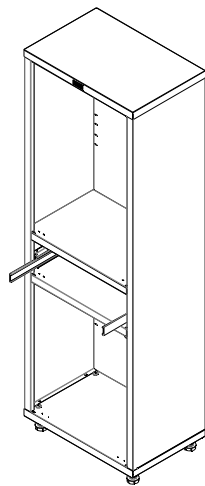

11


Установка заранее собранного ящика в корпус шкафа. Выдвинув несущую часть направляющих, совместить и завести соответствующие крепежные элементы в пазы ящика.




Ящик
выдвижной

12


Инструкция по установке выдвижных ящиков в шкаф MD 1 1760 (R)-1

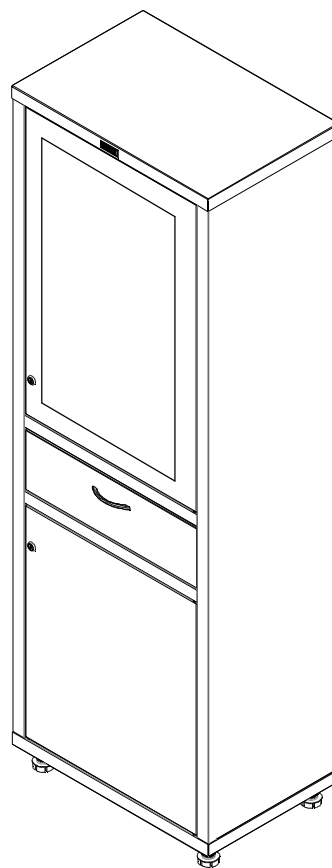


Сборка ящика малого

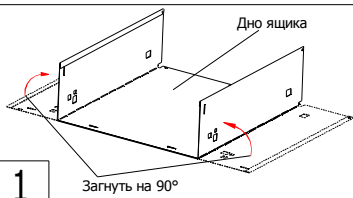


1

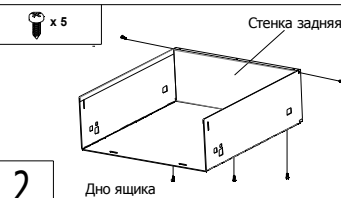

2

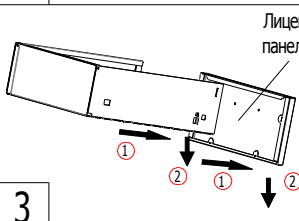


3

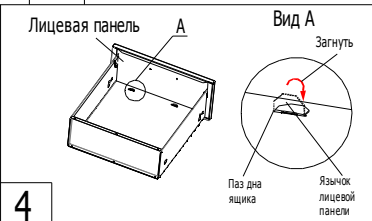


4

Разборка шариковой направляющей

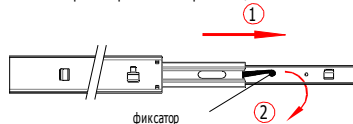


5

установка элемента направляющей на ящик
пазы под язычки направляющей

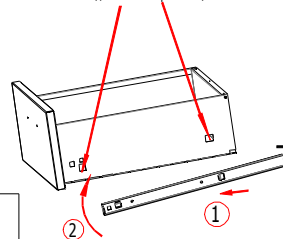

6

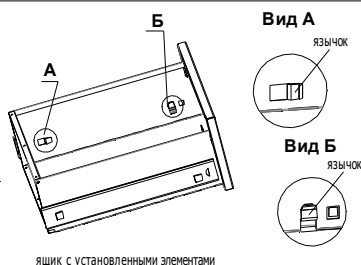

ящик с установленными элементами


Вид А

язычок

Вид Б

язычок

Установка ящиков в шкаф

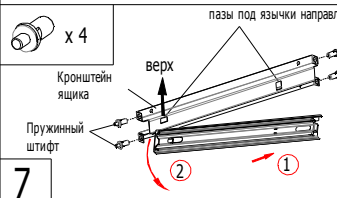


7

Внимание: Правильное положение кронштейна в шкафу - горизонтальный паз сверху

Кронштейн правый выполнен зеркально левому.

Установка нижнего разделителя

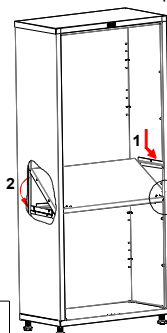

8


Вид Г

разделитель

стенка боковая


вырез под разделитель

Вид Д

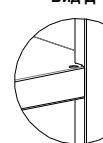

Разделитель в установленном виде

Установка кронштейна на заднюю стенку

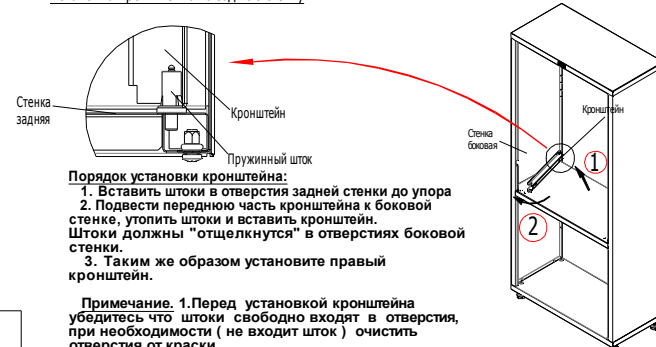

9

Порядок установки кронштейна:

1. Вставить шток в отверстие задней стенки до упора
2. Подвести переднюю часть кронштейна к боковой стенке, утопить шток и вставить кронштейн. Штоки должны "отщелкнуться" в отверстиях боковой стенки.
3. Таким же образом установите правый кронштейн.

Примечание. 1. Перед установкой кронштейна убедиться что шток свободно входит в отверстие, при необходимости (не входит шток) очистить отверстия от краски.