



Шкафы медицинские серии МД

Инструкция по сборке.

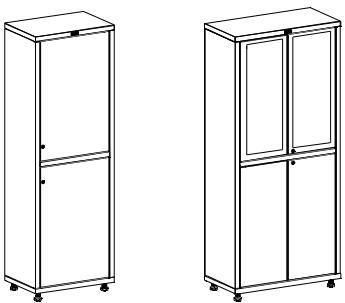


Шкафы одностворчатые (верхнее и нижнее отделение со стальными дверцами и полками) и двустворчатые (верхнее отделение с дверцами со стеклом в стальной рамке и стальными полками, нижнее отделение со стальными дверцами и полками)

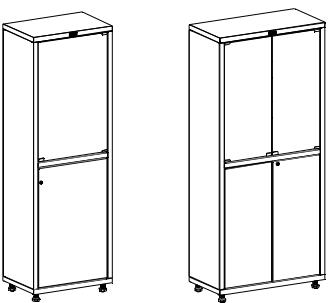

Шкафы одно- и двустворчатые (верхнее отделение со стеклянными дверцами и полками; нижнее отделение со стальными дверцами и полками)


Перед сборкой

- Сборку проводите на мягкой неабразивной поверхности (ковролин, линолеум, картон и т.д.) во избежание появления царапин на поверхностях деталей при сборочных операциях
- Будьте осторожны при использовании шуруповерта, вращающийся патрон может повредить лакокрасочное покрытие шкафа.

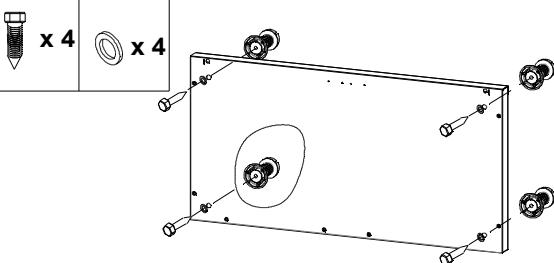

Установите регулируемые опоры на основание, используя саморезы идущие в комплекте вместе с опорами. С саморезами использовать шайбы M10.


1

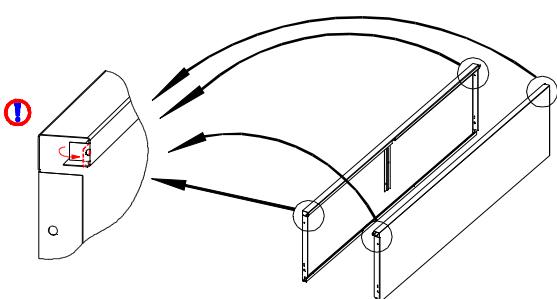

На боковых стенках на торцевых гибах выпрямить язычки (по 2 язычка на стенку), которые изначально загнуты из-за особенностей технологии производства

2

x 4

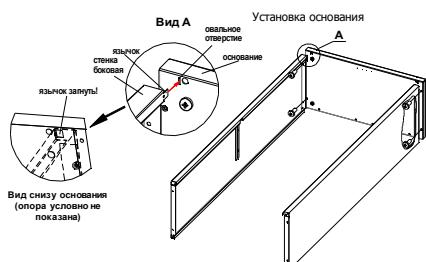

- Соедините правую боковую стенку с основанием, так чтобы язычок попал в свильное отверстие на основании (см. вид А).
- Вкрутите винты согласно рисунка
- Затянуть язычок боковой стенки
- Левую стенку соедините с основанием аналогично правой


3

x 11
для односторончатогоx 16
для двусторончатого

Соединение боковой и задней стенки



Установка задней (-их) стенки (-ок)

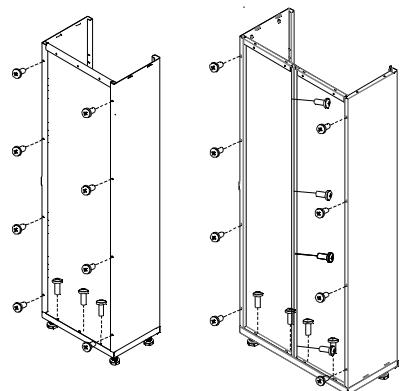


- Поставить шкаф вертикально
 - Установить заднюю (-ие) стенку(-и)
 - Вкрутить винты согласно рисунка
- Примечание: Будьте внимательны при установке задней(-их) стенки(-ок). Следите чтобы приваренное ребро открытым зевом смотрело вверх (см. вид В)

4

x 3
для односторончатого

x 4
для двусторончатого


Установка крыши

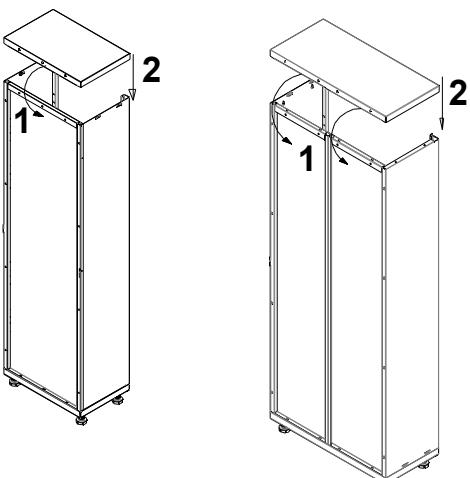

- Заведите гиб на задней части крыши за гиб на задней стенке
- Равномерно опустите переднюю часть крыши до характерного щелчка.
- Зафиксируйте крышку при помощи винтов.


5

Установка разделителя

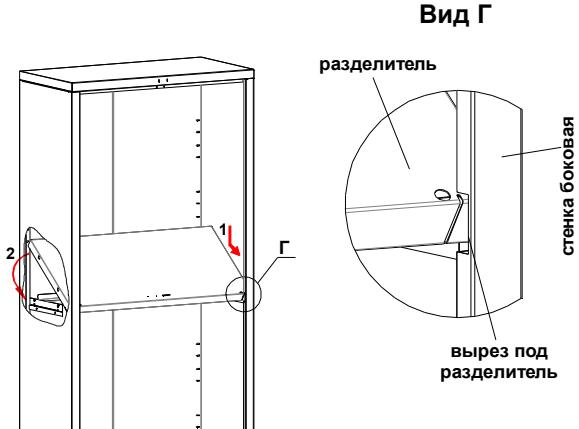

Вид Г


Вид Д

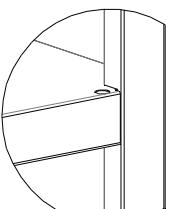

Разделитель в установленном виде

1. Заведите внутрь шкафа разделитель, так чтобы его плоскость была под углом, как показано на рисунке.
2. Опускайте разделитель так, чтобы его передняя кромка попала в вырезы на боковых стенках (см. вид Г)
3. Опустите заднюю часть разделителя, так чтобы его плоскость стала параллельна основанию, при этом его боковые и задний гибы должны попасть в соответствующие зевы ребер на боковых и задней(-их) стенки(-ок). (См. вид Д)

6

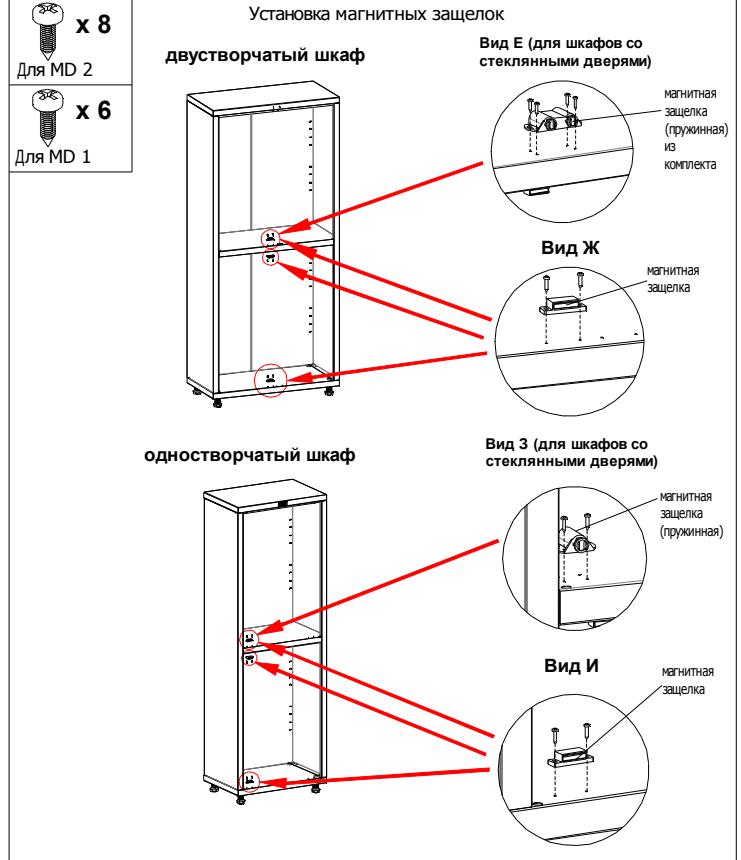


1. Установите магнитные защелки из комплекта (см. Виды Е-И)
2. Для шкафов со стеклянными дверцами, в верхнее отделение устанавливается пружинная защелка с лифтовым механизмом (см. Вид Е и 3)

Замечание: Не затягивайте сразу шурупы магнитных защелок. Сначала отрегулируйте выступление/западание дверок и уже после этого затяните шурупы


7

x 16

Установка скоб под полки

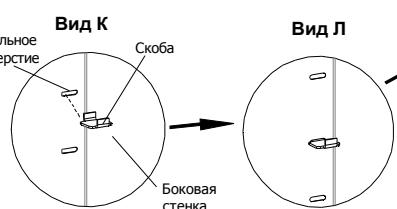

Установка полок

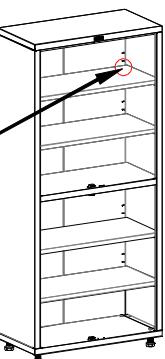

1. Установите скобы под полки (см. Вид К и Л)
2. Установите полки в шкаф, по две в верхнее и нижнее отделение.

Примечание: Стеклянные полки ставятся в верхнее отделение

8

x 2

x 2


для одностворчатого

x 4

x 4

для двухстворчатого

Установка стальных дверок

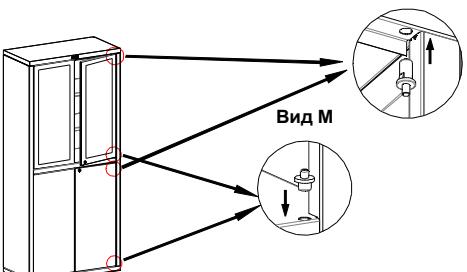


1. Предварительно очистите от напльвов краски отверстия под оси в дверках.
2. Установите цельнопластиковые оси вниз (см. вид М)
3. В верхние отверстия установите пружинные оси. (см. вид Н)
4. Установите дверку так, чтобы нижняя ось вошла в отверстие дверки, далее придавите шток пружинной оси и заведите дверку под ось, шток должен отщелкнуться в отверстие дверки.

Примечание: Вы можете подложить под нижнюю ось регулировочную шайбу (идет в комплекте) для регулировки зазора между дверью и корпусом шкафа

9

Установка стеклянных дверок

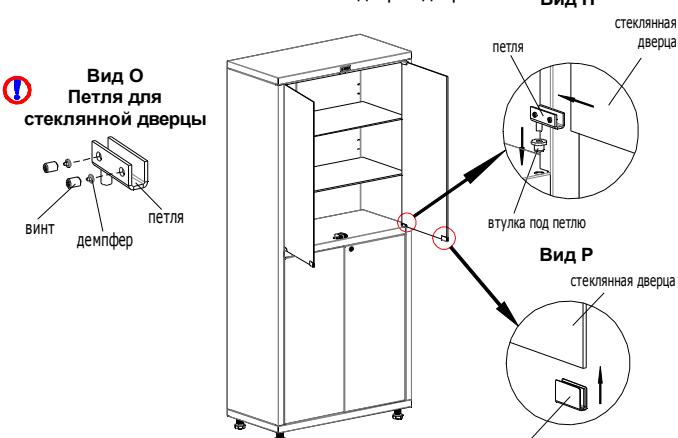

1. Возьмите из комплекта петли (петли идущие в комплекте с пружинной магнитной защелкой не используйте) для стеклянных дверей и убедитесь, что на торцах винтов установлены демпферы (См. Вид О)
2. Установите втулки в отверстия в разделителе и крыши. Во втулки установите петли, предварительно выкрутив винты так, чтобы в паз могло зайти стекло. (См Вид П)
3. В пазы петель установите стекло, выровняйте его и затяните винты на петлях
4. Установите накладку под магнитную защелку (из комплекта с пружинной магнитной защелкой) на стекло. (См. Вид Р)

10

- Пояснения к инструкции**
1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
 2. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом верхнем углу ее изображения.
 3. Пункты инструкции обозначенные символом являются важными для сборки и обязательны к исполнению.

Рекомендации по эксплуатации медицинских шкафов

1. Установку шкафа следует производить на ровной горизонтальной поверхности
2. Для компенсации неровностей пола, произвести регулировку ножек (после пунктов 8 или 9).
3. Навеску дверей рекомендуется производить непосредственно по месту эксплуатации шкафа
4. Загрузку шкафа (документами, медикаментами и т.п.) следует начинать с нижней части шкафа.
5. Рекомендуется распределять груз по поверхности полок шкафов для их равномерной загрузки

Примечания

1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

